


Diagrama de uso

MODELO ANATÓMICO PARA TACTOS VAGINALES EN GESTANTES

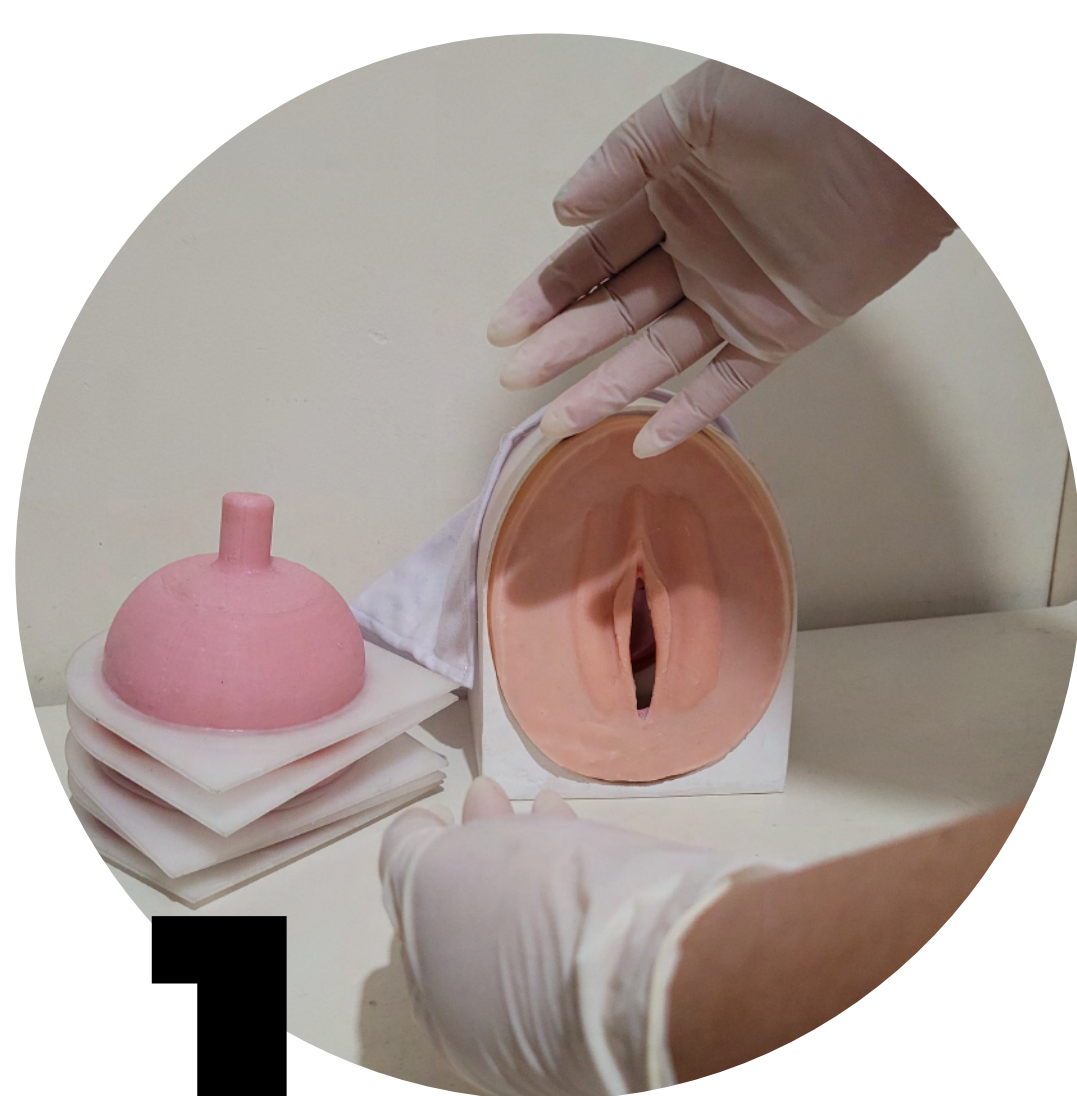

1

Colocar guantes antes de manipular el modelo



2

Asegurar los broches a presión de la vulva con la base exterior o con el maniquí




3

Lubricar la vulva con vaselina



4

Seleccionar el inserto de cuello uterino que se utilizará

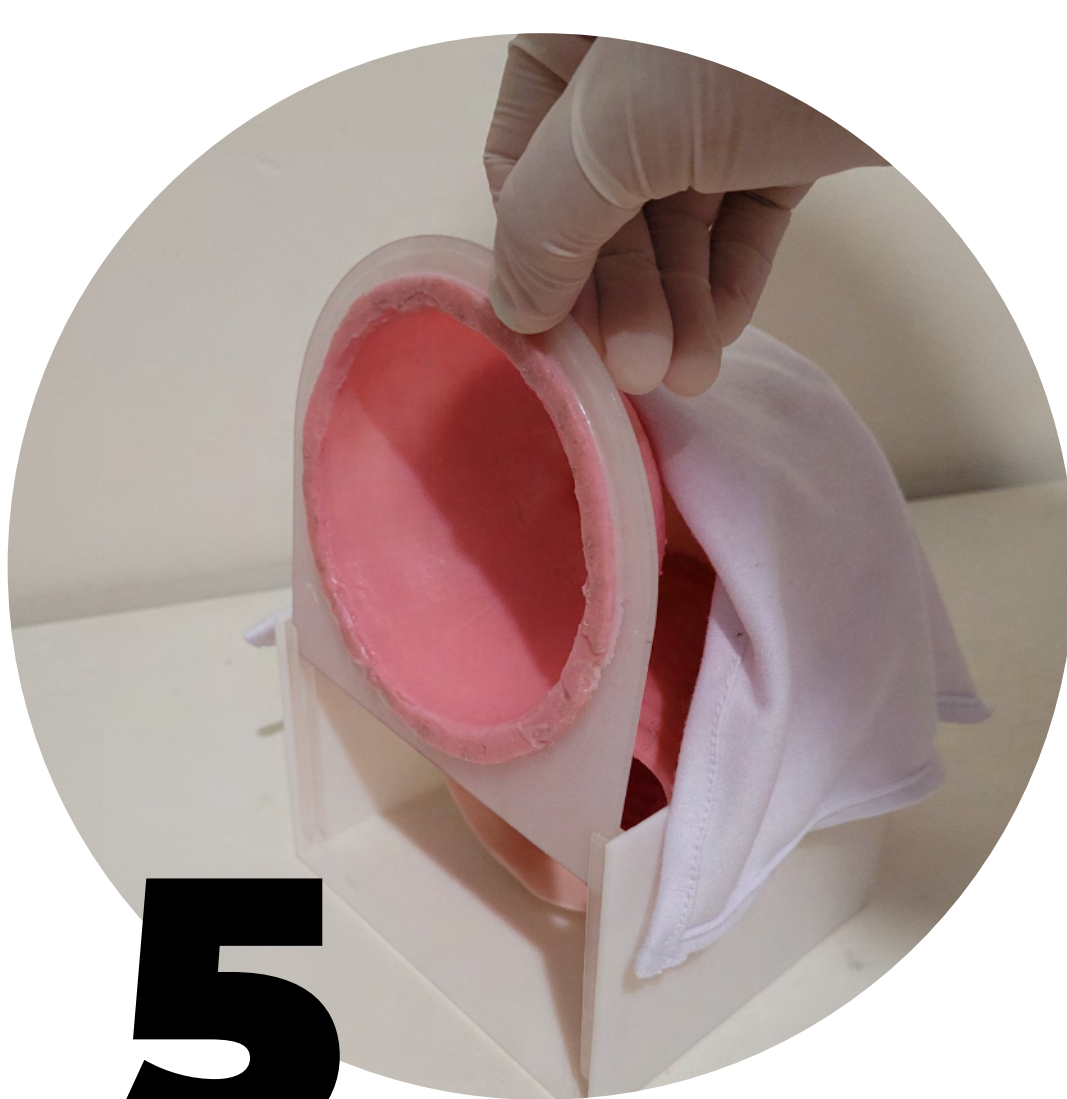

5

Ensamblar en la parte posterior del modelo



6

Ubicar la cabeza del feto dentro del cuello uterino



7

Realizar las exploraciones vaginales de acuerdo a las indicaciones del docente



8

Limpiar el modelo al finalizar con una toalla desinfectante o con agua



9

Apilar los insertos del cuello y guardar en el empaque